


Tobii Communicator

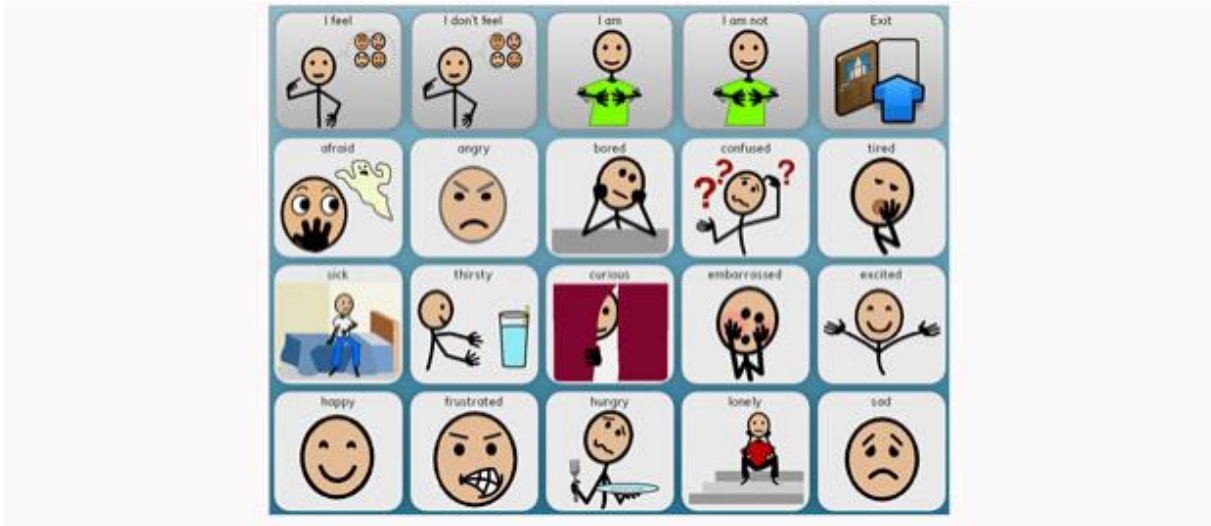

Tobii Communicator is een programma waarmee op eenvoudige wijze dynamische communicatiekaarten gemaakt kunnen worden. De kaarten kunnen uiteenlopende vormen aannemen met letters, cijfers, volledige teksten, symbolen of foto's.

Met Tobii Communicator bouw je ook op een vlotte manier bijzonder uitgebreide communicatiekaarten

Communicator bevat een groot aantal kant-en-klare paginasets voor communicatie en tekstinvoer. Zo zijn er voor tekstinvoer diverse schermtoetsenborden in verschillende lay-outs met woordvoorspelling, die de gebruiker helpen snel en foutloos te typen. Ook zijn er speciale toetsenborden voor het surfen op internet en voor het besturen van programma's als Internet Explorer en Word. Er zijn paginasets voor symboolcommunicatie en voor tekstgebaseerde communicatie, beide met spraakuitvoer. Een speciale paginaset voor muisbesturing geeft gebruikers van schakelaars volledige toegang tot allerlei externe applicaties, doordat de muispijl bestuurd kan worden en muiskliks kunnen worden nagebootst. In de Premium versie van Tobii Communicator kunnen pagina's bovendien gebruikt worden voor het versturen en ontvangen van e-mail en sms, voor chatten en voor het aansturen van een aangesloten infraroodapparaat voor omgevingsbediening. Tenslotte zijn er nog verschillende spelletjes, een agenda, een rekenmachine en een muzikspeler.

Communiceren

Zowel met tekst als met symbolen kunnen volledige zinnen worden opgebouwd. Alle berichten kunnen worden uitgesproken door de Acapelastem. Daarnaast kunnen spraakopnames of andere geluidsbestanden aan de toetsen gekoppeld worden.

Bij het invoeren van tekst wordt de gebruiker geholpen door de woordvoorspeller. Afkortingen worden automatisch aangevuld. De woordvoorspelling is gebaseerd op kennis van woordfrequenties en woordcombinaties.

Bij het werken met plaatjes kan gebruik gemaakt worden van grammaticale ondersteuning: werkwoorden kunnen door Communicator automatisch vervoegd worden.

Berichten versturen en ontvangen

In Tobii Communicator Premium kunnen samengestelde berichten worden verzonden als e-mail of als sms. Voor het versturen van berichten hoeft slechts op de foto van de ontvanger geklikt te worden. Voor sms'en moet de computer of het hulpmiddel zijn uitgerust met een gsm-module met simkaart.

Bediening

Communicator paginasets kunnen bediend worden met de muis, maar ook met aanraakscherm, **schakelaars**, of andere muisalternatieven. Alle kaarten ondersteunen automatisch scanning. Communicator is bovendien zeer geschikt voor gebruik met de **Tobii oogbesturingssystemen**.

Eigen paginasets maken

Alle kant-en-klare paginasets kunnen volledig naar eigen inzicht aangepast worden en het is ook mogelijk nieuwe pagina's te ontwerpen. Daarbij kunnen alle soorten vormen, kleuren, randen, plaatjes, tekst en de bijgeleverde SymbolStix symboolbibliotheek gebruikt worden. Aan elke gemaakte knop kan een functie worden toegewezen, zoals het uitspreken van tekst, het sturen van tekst naar een tekstverwerker, het afspelen van een mp3-bestand, het aanzetten van de tv, het uitvoeren van een Windows functie (bijv. programma afsluiten), of het versturen van een e-mail. Alle knoppen zijn toegankelijk via verschillende scantechnieken. Er kan gekozen worden tussen verschillende voorgedefinieerde scanpatronen, maar het scanpatroon kan ook volledig zelf bepaald worden.

De bewerkmodus van Communicator 4 heeft werkbalken in de stijl van Microsoft Office. Omdat deze werkbalken bij de meeste mensen al bekend zijn, is het eenvoudig om ermee te werken. De grote hoeveelheid meegeleverde paginasets besparen u tijd, omdat er vaak wel een paginaset is die lijkt op wat u wilt maken, zodat u kunt volstaan met het aanpassen daarvan.

Dankzij Slimme knoppen en het nieuwe hulpmiddel Objecten dupliceren kunnen snel eigen pagina's met geavanceerde functies gemaakt worden. Zo kunt u bijv. een toetsenbord maken door één toets te tekenen, deze aan te wijzen als toetsenbordtoets en te dupliceren. In de gebruiksmodus wordt van uw toetsen vervolgens automatisch een toetsenbord van gemaakt met de ingestelde gebruikerslay-out (Qwerty, ABC, Scan of Aanwijzer).

SymbolStix symbolen

In Communicator 4 zijn de mogelijkheden voor plaatjescommunicatie sterk verbeterd. Communicator 4 wordt geleverd met de uitgebreide gratis SymbolStix bibliotheek.

Sono Key

Sono Key is een complete gebruikersinterface voor Tobii Communicator, in de vorm van een reeks paginasets. Sono Key maakt de verschillende functies van uw communicatiehulpmiddel snel en gemakkelijk toegankelijk. Sono Key kan bediend worden met alle denkbare invoerhulpmiddelen, maar is dankzij de grote knoppen in het bijzonder geschikt voor bediening met de ogen.

Sono Key is ontworpen voor geletterde gebruikers. Met Sono Key kunt u uw eigen gesynthetiseerde spraakboodschappen maken en documenten opslaan en printen. Ook heeft u de beschikking over kalenders, e-mail, chat, sms, Facebook, een mediaspeler en fotobibliotheken. Via dezelfde grote knoppen heeft u bovendien controle over de Windows omgeving en internet browser en kunt u zelf de belangrijkste gebruikersinstellingen wijzigen.

Light editie

De lightversie van Tobii Communicator bevat alleen de schermtoetsenbordfuncties. Deze versie is bedoeld voor gebruikers die het programma alleen willen gebruiken voor het invoeren van tekst in andere Windows programma's zoals MS Word.

Licentie

Met één Tobii Communicator licentie kan de software op 3 computers geregistreerd worden.

